

Comment utiliser votre inhalateur ELLIPTA :

Lorsque vous recevez l'inhalateur ELLIPTA qui vous a été prescrit, il est en position « fermée ». Inscrivez la date à laquelle il faut jeter l'inhalateur dans l'espace prévu à cet effet sur l'étiquette de l'inhalateur (« Jeter le »), soit 6 semaines après la date d'ouverture du plateau.

L'inhalateur ELLIPTA est prêt à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de l'amorcer avant de l'utiliser pour la première fois. N'agitez pas l'inhalateur ELLIPTA.

Vous devez ouvrir le couvercle de l'inhalateur ELLIPTA uniquement lorsque vous êtes prêts à prendre une dose. Si vous ouvrez et fermez le couvercle sans inhaler le médicament, vous gaspillerez une dose.



Comment dois-je utiliser mon inhalateur ELLIPTA?

Mode d'emploi étape par étape




1. OUVRIR

- Activez l'inhalateur ELLIPTA en faisant glisser le couvercle sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
- Tenez l'inhalateur ELLIPTA loin de votre bouche et expirez profondément. N'expirez pas dans l'inhalateur.



2. INHALER

- Placez l'embout buccal entre vos lèvres et refermez-les fermement autour de celui-ci.
- Ne bloquez pas l'évent avec vos doigts.
- Prenez une longue inspiration bien profonde et régulière, et retenez-la le plus longtemps possible (durant 3 ou 4 secondes au moins).

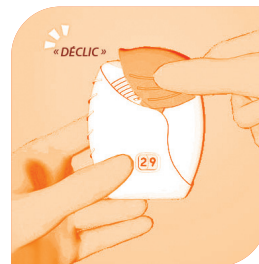

3. FERMER

- Retirez l'inhalateur de votre bouche, puis expirez lentement. Respirez normalement.
- Nettoyez l'embout buccal de l'inhalateur avec un papier-mouchoir propre et sec.
- Faites glisser le couvercle complètement vers le haut.

Rincez votre bouche avec de l'eau après l'emploi. N'avalez pas l'eau.

Pour obtenir des instructions complètes, consultez le feuillet d'information à l'intention des patients, fourni avec votre médicament.